

# COLLARÍN CERVICAL TIPO AMBU

El collarín cervical tipo ambu es un dispositivo médico diseñado para proporcionar **estabilización y soporte** a la columna cervical (cuello) en casos de lesiones traumáticas, afecciones médicas que requieren inmovilización. Su principal función es limitar los movimientos del cuello, lo que ayuda a **prevenir lesiones** adicionales.

## MATERIALES

Polietileno moldeado por inyección.  
Cubierta con forro de espuma.

## COLORES

Estructura	Forro
 Amarillo	 Azul
	 Blanco

## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS



**Collarín regulable** que une los 4 tamaños para adulto en uno solo.

Se coloca al paciente en **3 pasos**:  
Ajusta el tamaño, bloquea y coloca.



12 Micro ajustes.

Posee ganchos para asegurar el tubo de oxígeno



No contiene látex.

Cuenta con dos botones de bloqueo.



Orificio con **abertura traqueal** para facilitar la intubación.

Cierre con velcro de fácil ajuste.



Una sola pieza sin montajes, colocación fácil y rápida.



Almacenamiento plano.





Traslucido para rayos X, tomografía computarizada, e imágenes por resonancia magnética.


Fabricado en material hipoalérgico.




## MEDIDAS

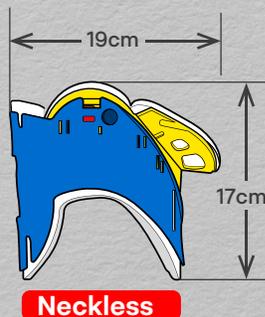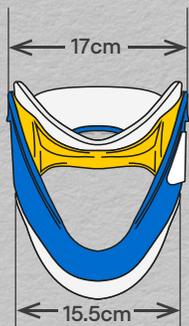


**Neckless**

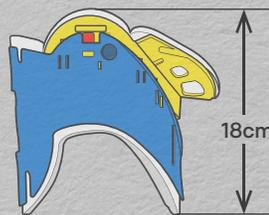

**Short**

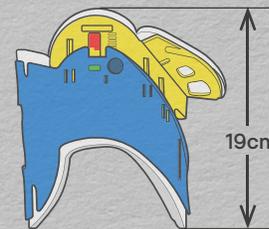

**Regular**

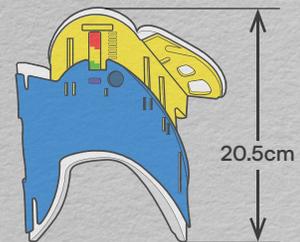

**Tall**



Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia Industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)






[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)

## MODO DE USO



Desbloquee los seguros jalando los 2 botones que se encuentran en la parte frontal ; Para ajustar solo deslice hacia arriba la sección amarilla del collarín.

Una vez que tenga la medida deseada, apriete los botones para bloquear los seguros.

Coloca al usuario.

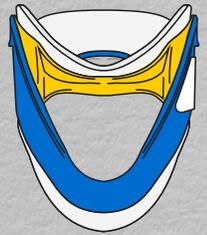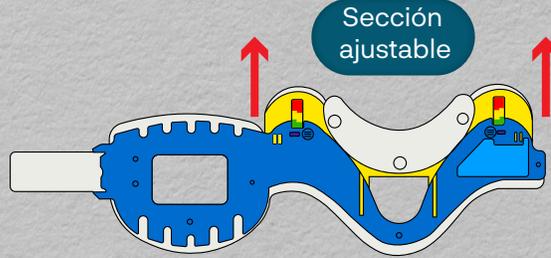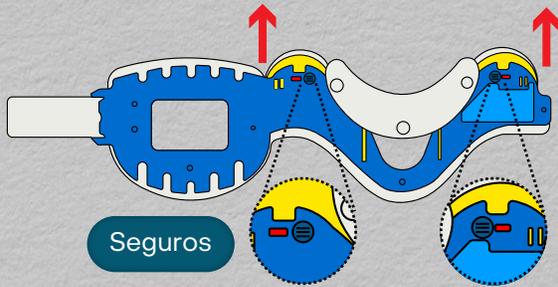

## APLICACIÓN

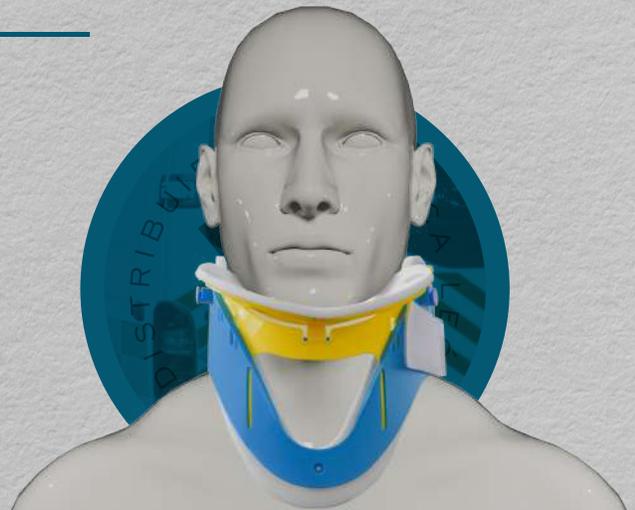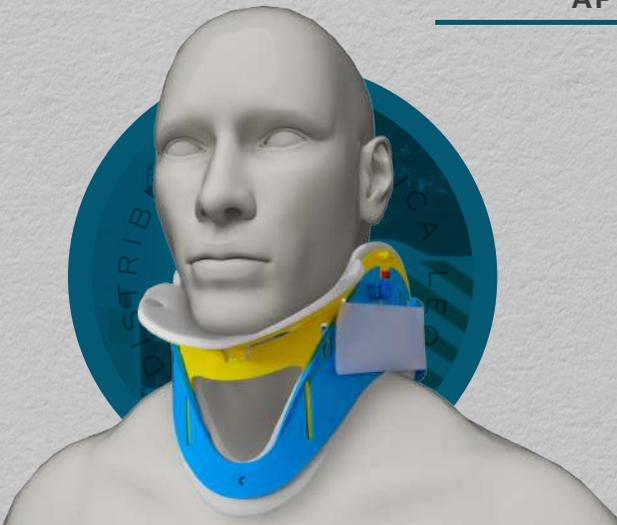

Calle Desarrollo Industrial 201,  
Colonia industrial las Cruces  
CP 37290 León Guanajuato México



Teléfono de Oficina  
477 529 8371  
Whatsapp  
477 724 6681



[www.dml-medica.com](http://www.dml-medica.com)



[ventas@dml-medica.com](mailto:ventas@dml-medica.com)  
[iarmenta@dml-medica.com](mailto:iarmenta@dml-medica.com)  
[clopez@dml-medica.com](mailto:clopez@dml-medica.com)